



QUIZZ

ENDOSCOPIE

EOHH – AP-HM 2023



1) Un colonoscope est un dispositif médical :

- ☐ Critique
- ☐ Semi-critique
- ☐ Non critique

Réponse : **Semi-critique**





2) Un urétroscope est un dispositif médical :

- ☐ Critique
- ☐ Semi-critique
- ☐ Non critique



Réponse : **Critique**





3) Quel rôle joue le biofilm dans la contamination d'un endoscope ?

(plusieurs réponses possibles)

- Le biofilm protège les bactéries contre les désinfectants chimiques
- Le biofilm rend les désinfectants beaucoup moins efficaces
- Le biofilm installé dans un endoscope n'a pas de conséquence sur le résultats du traitement de l'endoscope



Réponses :

- **Le biofilm protège les bactéries contre les désinfectants chimiques**
- **Le biofilm rend les désinfectants beaucoup moins efficaces**



4) Mon patient est infecté par le virus de l'hépatite C (infection aiguë ou chronique)

- Je planifie son examen en premier
- Je fais un entretien habituel de l'endoscope utilisé
- Je mets une double paire de gants



Réponse :

- Je fais un entretien habituel de l'endoscope utilisé



5) Mon patient est porteur d'un Clostridium difficile et va avoir une coloscopie

(plusieurs réponses possibles)

- Je planifie son examen en dernier
- Je sors de la salle tout matériel non nécessaire à l'examen
- Je fais un entretien habituel de l'endoscope utilisé



Réponses :

- Je sors de la salle tout matériel non nécessaire à l'examen
- Je fais un entretien habituel de l'endoscope utilisé



6) Une procédure de traitement manuel de l'endoscope comprend obligatoirement :

- 4 étapes : prétraitement – nettoyage – désinfection - rinçage
- 6 étapes : prétraitement – double nettoyage – désinfection – rinçage - séchage
- 8 étapes : prétraitement – double nettoyage – double rinçage – désinfection – rinçage terminal - séchage



Réponse :

- 8 étapes : prétraitement – double nettoyage – double rinçage – désinfection – rinçage terminal - séchage



7) Le prétraitement :

(plusieurs réponses possibles)

- N'est pas nécessaire si l'endoscope est traité immédiatement
- Permet d'éliminer les souillures
- Réduit le risque de contamination du personnel qui va le prendre en charge
en suivant



Réponses :

- **Permet d'éliminer les souillures**
- **Réduit le risque de contamination du personnel qui va le prendre en charge en suivant**



8) Le test d'étanchéité ?

(plusieurs réponses possibles)

- Permet de détecter une fuite
- Est fait systématiquement avant le nettoyage de l'endoscope
- Doit être réalisé sur un endoscope en immersion
- Facilite l'écouvillonnage des canaux



Réponses :

- **Permet de détecter une fuite**
- **Est fait systématiquement avant le nettoyage de l'endoscope**
- **Doit être réalisé sur un endoscope en immersion**



9) Je n'ai plus d'écouvillons adaptés à mon coloscope

- Je prends celui adapté aux nasofibroscopes
- J'en recherche un dans un autre service car l'écouvillon doit être adapté en longueur et en diamètre aux canaux de l'endoscope
- Je ne fais pas d'écouvillonnage, l'irrigation suffit



Réponse :

- **J'en recherche un dans un autre service car l'écouvillon doit être adapté en longueur et en diamètre aux canaux de l'endoscope**



10) Quel est le temps global dédié à l'ensemble des opérations du premier nettoyage ?

- ☐ 5 minutes
- ☐ 10 minutes
- ☐ 15 minutes



Réponse : **10 minutes**



11) Le rinçage terminal a pour objectif :

- D'éliminer toute trace de détergent
- D'éliminer tous les micro-organismes résiduels
- De réduire le risque toxique en éliminant toute trace de désinfectant



Réponse :

- **De réduire le risque toxique en éliminant toute trace de désinfectant**



12) Pour le rinçage terminal d'un coloscope quel type d'eau doit être utilisé ?

- ☐ Eau pour soin standard
- ☐ Eau bactériologiquement maîtrisée
- ☐ Eau stérile versable



Réponse :

- **Eau bactériologiquement maîtrisée**



13) Sécher un endoscope après désinfection : *(plusieurs réponses possibles)*

- ☐ N'est pas nécessaire quand il est utilisé immédiatement pour un autre examen
- ☐ Est obligatoire quand l'endoscope part en stockage
- ☐ Dure moins de 30 secondes



Réponses :

- **N'est pas nécessaire quand il est utilisé immédiatement pour un autre examen**
- **Est obligatoire quand l'endoscope part en stockage**



14) Les endoscopes du plateau d'endoscopie digestive sont traités en laveurs désinfecteurs

- ☐ Il n'est pas nécessaire de faire de prétraitement
- ☐ Il est nécessaire de faire un prétraitement



Réponse :

- **Il est nécessaire de faire un prétraitement**



15) Avant de mettre un endoscope en LDE :
(plusieurs réponses possibles)

- ☐ J'irrigue tous les canaux irrigables
- ☐ J'écouvillonne tous les canaux écouvillonnables
- ☐ Je brosse l'extrémité et les anfractuosités de l'endoscope



Réponses :

- **J'irrigue tous les canaux irrigables**
- **J'écouvillonne tous les canaux écouvillonnables**
- **Je brosse l'extrémité et les anfractuosités de l'endoscope**



16) A chaque branchement d'endoscope dans le LDE, je vérifie :

- ☐ Le bonne connexion de tous les canaux de l'endoscope
au
LDE
- ☐ L'absence d'eau dans le connecteur du testeur
d'étanchéité
- ☐ Les connexions des flacons de produits



Réponse :

- **Le bonne connexion de tous les canaux de l'endoscope au LDE**



17) Les endoscopes ne peuvent pas être stockés dans :

- ☐ Des mallettes
- ☐ Des tiroirs
- ☐ Des armoires



Réponse :

- **Des mallettes**